


ほしかった。こんなカタチの採尿具。



URO CATCH
ウロキャッチ


簡単採取

広い採尿口を確保、尿をかけるだけで採尿できます。

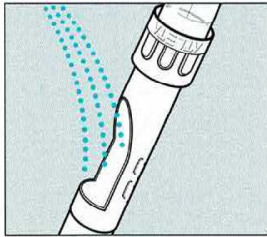


清潔

手に尿がかかりません。

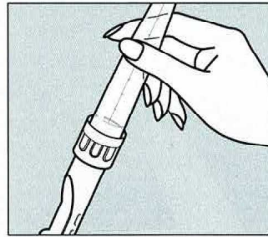

省力

スピッツへの尿の移し替えが不要です。

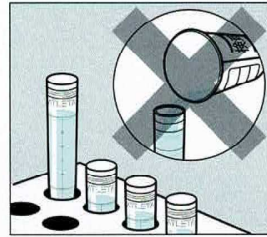


省スペース

検体の保管スペースが削減されます。




試験紙検査

尿試験紙での検査ができます。

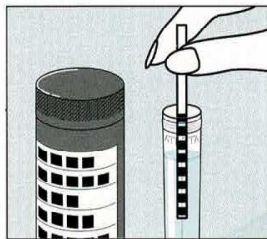

遠心分離(尿沈渣)

遠心分離器にかけられ尿沈渣用検体が得られます。

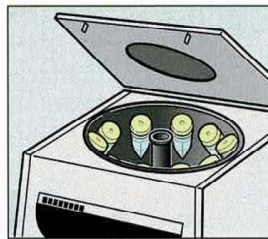


密封性

専用蓋がありますので臭いの拡散、異物の混入を防げます。




自動検査

各種自動検査機に対応可能です。

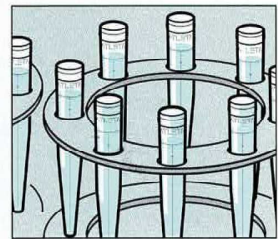

■目盛付きスピッツ

- 1~10ccの目盛付きで尿量の目安が得られます。

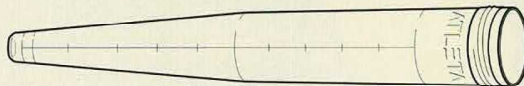


●ウロキャッチ仕様

部品名	使用樹脂	色	サイズ(幅×直径×長さ)(mm)
採尿器	PP	無色	17~22×118
カバー	PP	黄色	20~25×119
スピッツ	PP	無色	6.3~17.5×107
蓋	PP	黄色	21.4×9

内容については、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。


ウロキャッチの使い方

①

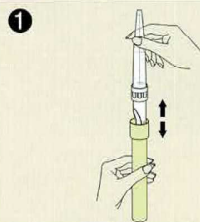


まっすぐに(回さず)黄色のカバーをぬぎとる。(二重になっていますので外側のカバーを外す)

②

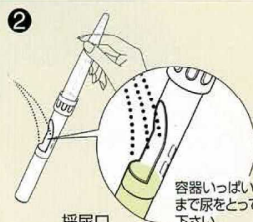

採尿口
スピッツ部分を持ち、放尿中の尿に採尿口をかざし、尿をとる。

③

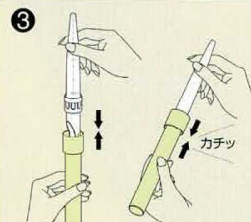

尿を採取後、カバーを元の位置に戻す。カバーは完全にしっかりと奥まで差し込む。

④



尿を採取後、ラベルをキリトリ線より切離して白色のフィルムを剥がし、巻付けて貼る。
ラベルと袋に必要事項を記入する。ウロキャッチを元通り袋に入れ封をし提出する。

■使用上のご注意

- 本採尿具は上記説明による採尿用途以外にはご使用にならないで下さい。
- 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と併せて担当医師が総合的に判断して下さい。

お問い合わせ先

(有)山久化成

〒206-0803

東京都稲城市向陽台4-2-C-1007

TEL:042(370)4744 FAX:042(370)4745

<http://www.yamahisa-net.co.jp>