

・・・新発想の進化した採尿具・・・

ハルンキット®

I 準備 郵送：安価

1. バーコードラベルの貼付は外筒のストレート部分が長く容易に行えます。
2. ハルンキットは軽量・コンパクトで、安価に郵送が出来ます。(健診用事前の送付)
外径：約19.5mm、重量：約9g

II 採尿 尿もれ：ネジ栓で安心

1. 広い採尿口で採尿が容易です。
2. 栓はネジ式で確実に閉められます。
尿もれの心配がありません。
開栓は、栓を横に折っても外れ、検査に便利です。
3. 自宅採尿の際、ゴミが発生しません。
4. チャック袋の併用で万一の尿もれにも安心です。

III 検査 自動分析：各種自動分析装置対応

1. 採尿量は約6ml採取出来ます。(4mlもあり)
10項目の尿試験紙の検査も容易に出来ます。
2. 口内径は約13mmです。
尿テストペーパーの挿入が容易に出来ます。
3. 尿自動分析装置等機械検査が可能です。
 - ・ペーパー尿自動分析装置
 - ・尿中成分分析装置
 - ・定量分析装置
4. 遠心分離→尿沈渣・鏡検が出来ます。
ペーパー尿自動分析装置での検査後、約5mlの検体が残る為、遠心分離後0.1mlの沈渣で鏡検が出来ます。

◆ハルンキット-SY



袋のQRコードを読むと動画で採尿方法を確認できます。

【注意】


CCLSの指針では沈渣・鏡検は10mlの検体量を原則としていますので、本採尿具を用いて実施するか否かは必ず各施設でご判断の上実施して下さい。

採尿後の容器の郵送、メール便等での送付お勧めいたしません。

【採尿方法】

袋裏面に表示

①採尿しやすいように、採尿器の

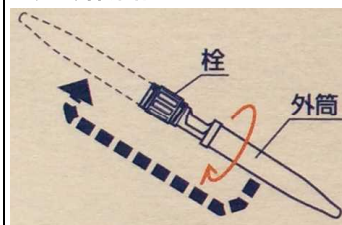


外筒の位置を組み替えます。
外筒を左に回転させて抜き取り栓の反対側に取り付けます。

②外筒側を持って採尿します。



排尿中に採尿口を尿にあて、採尿容器一杯に尿を取ります。

③外筒を元の状態に戻します。

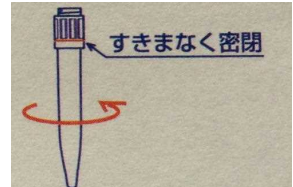

外筒を元のように採尿容器にかぶせて戻し、右に回して密栓します。尿が漏れないことを確認して下さい。

お問い合わせ先

(有)山久化成

〒206-0803

東京都稲城市向陽台4-2-C-1007

TEL:042(370)4744 FAX:042(370)4745

http://www.yamahisa-net.co.jp

新発想の進化した採尿用具

(有)山久化成

〒206-0803

東京都稲城市向陽台4-2-C-1007

TEL:042(370) 4744 FAX:042(370) 4745

http://www.yamahisa-net.co.jp

■ハルンキット

		■ハルンキット-SN	■ハルンキット-SK	■ハルンキット-SY	■ハルンキット-AY
外 観	使用方法、氏名欄、QRコードは袋表、裏面に印刷				
	キット構成	キット構成	キット構成	キット構成	キット構成
採 尿 量		・尿量約6m l採取	・尿量約6m l採取	・尿量約6m l採取	・尿量約4m l採取
材質	内 筒	PP半透明	PP半透明	PP半透明	PP半透明
	外 筒	PP半透明	PP褐色	PP黄色	PP黄色
	栓	PPベージュ	PPベージュ	PPベージュ	PPグリーン
		・尿の色調を観察できます	・外筒は褐色で特殊分析に適応	・外から尿の色が見えません	・外から尿の色が見えません
検査対応		・尿試験紙10項目検査も容易です。自動分析装置に対応			
サ イ ズ		・長さ(全体)：117mm ・長さ(外筒のみ)：107mm ・外径：φ19.5mm ・外径(胴)：16.7mm、 ・内口径：約φ13mm ・重量：約9g、			
包 装		1,000本(100本x10)/箱 袋入り、ラベル無し、本体のみの包装があります			
図解使用説明書		図解使用説明書は各種あります ・日本語版 ・英語版 ・中国語版 ・ポルトガル語版			
特 徴		・袋のQRコードを読めば、動画で採尿方法を確認できます。 ・広い採尿口で採尿が容易です。尿の取りこぼしを軽減します。 ・チャック袋を使用し、万一の尿漏れにも安心です。 ・栓はネジ式で確実に閉められます。尿漏れの不安がありません。栓はネジ式ですが、開栓時栓を横に折って外し、検査に利便です。 ・容器の口径が大きくテストペーパーの使用が容易に出来ます。 ・定性自動分析装置、自動定量分析装置、尿中成分分析装置へも対応します。 ・遠心分離が可能で、尿沈渣・鏡検が出来ます。(尿量の適正については各自でご判断ください) ・軽量・コンパクトで、安価に郵送できます。(空容器の輸送) ・袋にシシ目を入れました。ここを突き破ると容易に容器を取り出すことが出来ます。			