

ハルンキット ミニ

・・・尿スクリーニング検査に便利な、尿カップのいらない 採尿具・・・



1. 確実な採尿性

- ・ 4 方の採尿口で確実な採尿ができ、尿不足が解消
- ・ 袋に採尿の動画用 QR コードを表示
動画を見れば操作法が容易に分かります。

2. 採尿コップ不要

- ・ 採尿時、コップ不要 直接容器に取れます。

3. 尿スクリーニング検査

- ・ 目視法、セミオート用および全自動尿分析装置に対応
(ラックにシスメックス保持具 NO.5 9 を装着)
- ・ 1 ～ 5 項目の尿試験紙、およびスティックの長さ 82 mm の尿試験紙にも対応
- ・ 栓は横倒しで開栓し、開口部から尿試験紙を挿入
- ・ 開栓せず採尿容器を引き上げて止め、主採尿口から尿試験紙の挿入も可能

4. 軽量・小型化

- ・ プラスチックごみの廃棄量軽減
- ◆製品本体のみ 5. 5 g ◆採尿量 2. 5 ml

5. トイレの混雑緩和


- ・ 自宅採尿により受診機関でのトイレの混雑を緩和

6. この一本で(本キット)採尿用具準備の完結

- ・ 使用説明(袋に表示)、ラベル(袋に附属)、
(ラベルの無いタイプもあります)

7. 包装

- ・ 1, 000 本(100 本 x 10) / 箱 ・ ラベル無しのキットも有り
- ・ 本体のみの包装もあります。

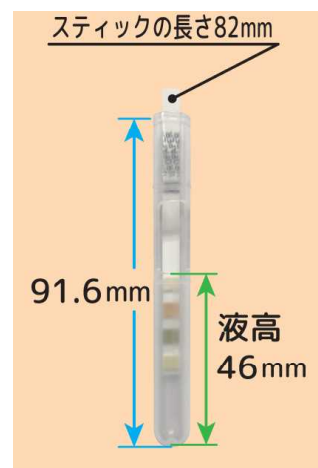


■使用上の注意

- ・ 採尿用途以外には使用しないで下さい。
- ・ 採尿後の容器を郵送、メール便等で送付することはしないで下さい。

■採尿具の廃棄処理

- ・ 各市町村の廃棄処理区分に従って下さい。
- ・ 仕様は予告なく変更する場合があります。

ハルンキット ミニ			
部品名	径 x 長さ(mm)	材質	色
栓	φ 15.5 x 22.8	P E	透明緑
採尿容器	φ 10.3 x 91.6	P P	透 明
外 筒	φ 12.2 x 96.4	P E	半透明黄色
全 長	1 1 8 mm	内口径	9 mm

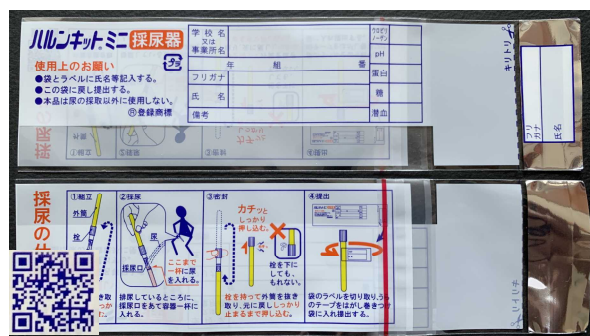

QRコードで動画による操作法の確認ができます。

ハルンキット ミニ袋(表・裏)

問合せ先

(有)山久化成

〒206-0803

東京都稲城市向陽台4-2-C-1007

TEL:042 (370) 4744 FAX:042 (370) 4745

http://www.yamahisa-net.co.jp

(210201)

新発想の採尿用具

(有)山久化成

〒206-0803


東京都稲城市向陽台4-2-C-1007

TEL:042 (370) 4744 FAX:042 (370) 4745

http://www.yamahisa-net.co.jp

■ハルンキットミニ

―――採尿口を裏側にも複数個設け、採尿をより確実に―――

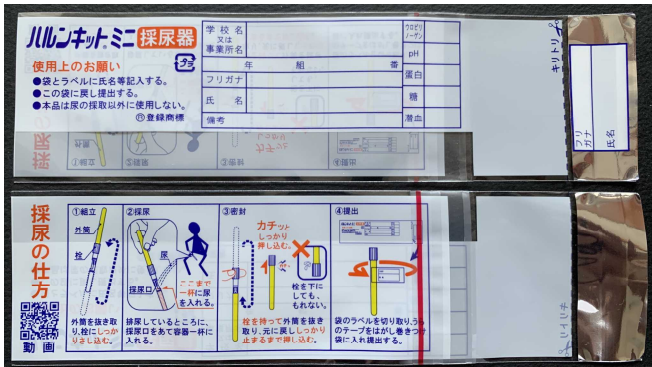	■ハルンキット ミニ(袋入)	袋(ラベル有り 表・裏)	袋(ラベル無し 表・裏)
外 観	 使用方法、氏名欄、QRコードは袋表、裏面に印刷 キット構成		
採 尿 量	・尿量約2.5ml採取可能		
検査対応	・尿試験紙 1～5項目の尿試験紙および、82mmの尿試験紙にも対応します。		
サ イ ズ	・長さ(全体)：118mm ・長さ(外筒のみ)：96.4mm ・長さ(内筒)：91.6mm ・栓外径：φ15.5mm ・外径(胴)：12.5mm、 ・内口径：約φ9mm ・重量：約5.5g、		
材 質	・内筒：PP半透明 ・外筒：PE黄色半透明 ・栓：PEグリーン		

QRコードで操作法を動画確認

包 装	HK-MYP1	ハルンキットミニ(袋入)	1,000本(100本×10)／箱
	HK-MYP2	ハルンキットミニ(袋入)／ラベル無し	1,000本(100本×10)／箱
	HK-MY00	ハルンキットミニ(本体のみ)	1,000本(100本×10)／箱 袋無し
	HK-MYB-SET-A	ハルンキットミニ バルクセットA (ラベル有り)	2,000本(容器100本×20袋、袋100枚×20束)／箱 容器と袋別々
	HK-MYB-SET-B	ハルンキットミニ バルクセットB (ラベル無し)	2,000本(容器100本×20袋、袋100枚×20束)／箱 容器と袋別々
図解使用説明書	図解使用説明書あります ・日本語版		
特 徴	・採尿口が4ヶ所有り、尿の取りこぼしを軽減します。 ・袋に採尿方法の動画用QRコードを表示してあります。 動画を見れば操作法が容易に分かります。 ・目視法、セミオート用および全自動尿分析装置に対応します。ラック使用時、シスメックス保持具No. 59を装着してください。 ・1～5項目の尿試験紙、およびスティックの長さ。 82mmの尿試験紙にも対応します。 ・栓は横倒しで開栓し、開口部から尿試験紙を挿入します。 ・開栓せず採尿容器を引き上げて止め、主採尿口から尿試験紙の挿入も可能です。 ・ラベル有りの袋の場合、記入面・ラベル面が同一面に有り事前の印字準備が容易です。 ・自宅採尿により受診機関でのトイレの混雑を緩和します。		