

Como coletar urina


tubo exterior



... Instrumento inovador & avançado para coleta de urina ...


Harn Kit

- ① Para coletar a urina mais facilmente, desloque o tubo exterior

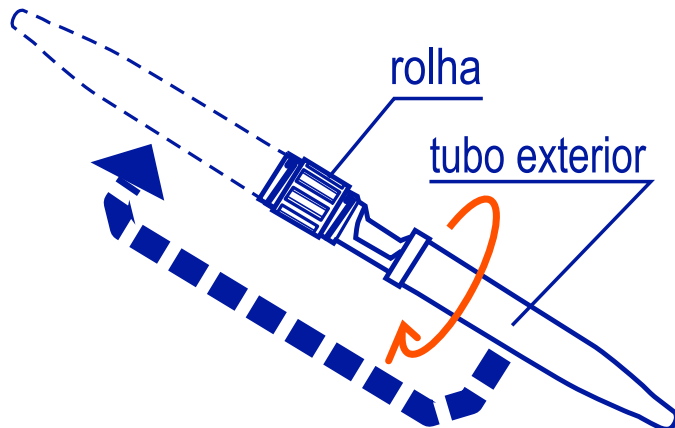


Gire o tubo exterior à esquerda e remova-o, prendendo no lado contrário do tubo

- ② Segure o tubo e faça a coleta de urina.

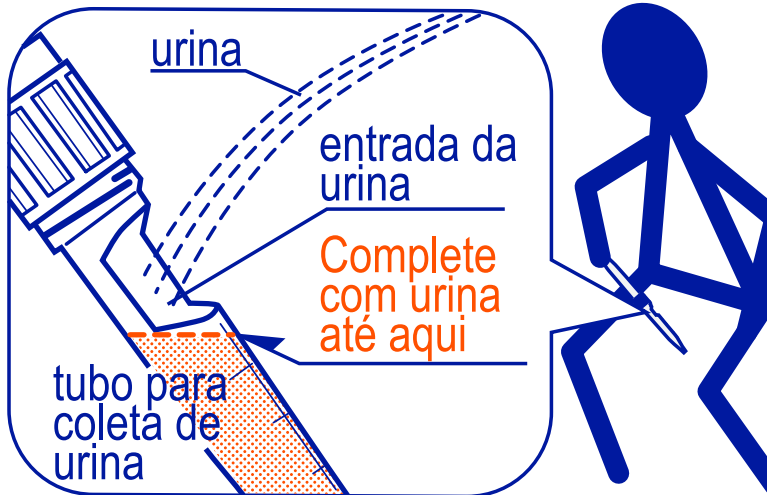

Durante a micção, posicionar o tubo na saída da uretra e fazer a coleta.

- ③ Retornar o tubo exterior para a posição original.

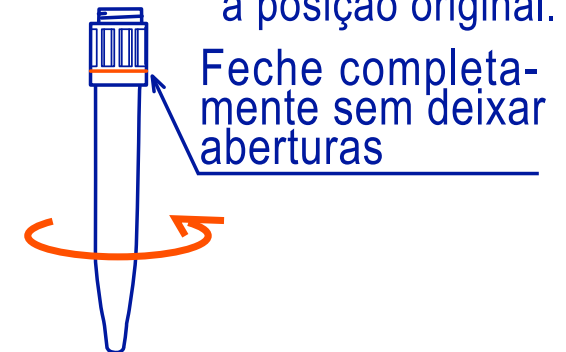

Volte o tubo exterior para a sua posição original e cubra-o com o recipiente para coleta da urina e lacre-o. Verifique se a urina não irá vazar.