


# 採尿の仕方

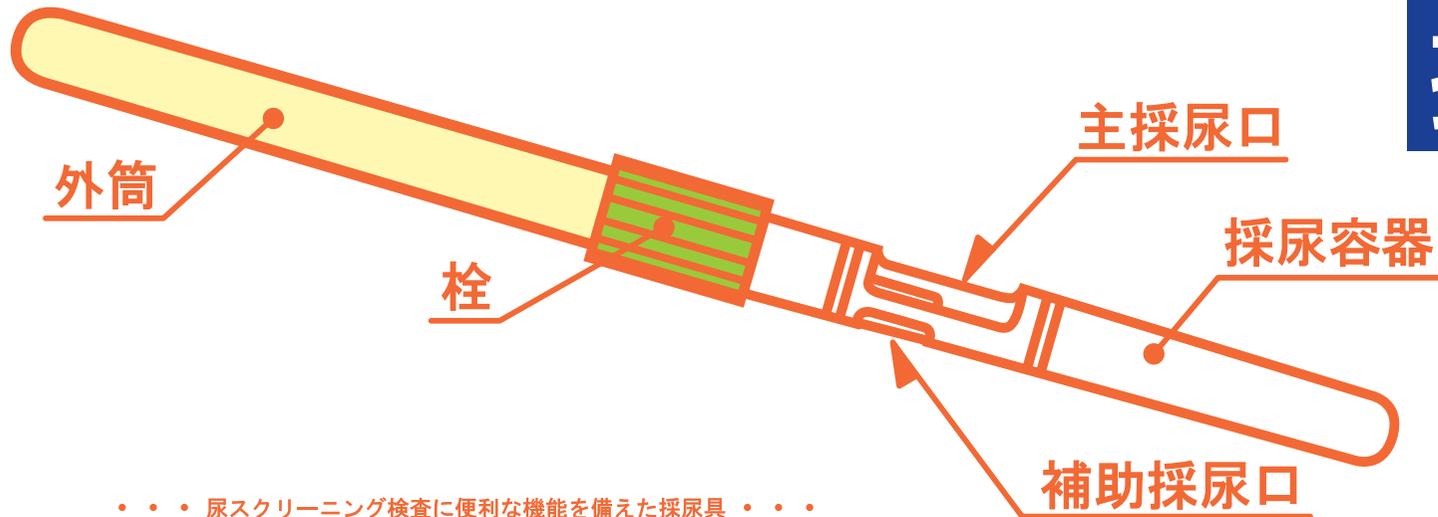


・・・尿スクリーニング検査に便利な機能を備えた採尿具・・・

## ハルニキット® ミニ



採尿方法の動画

### ①組立

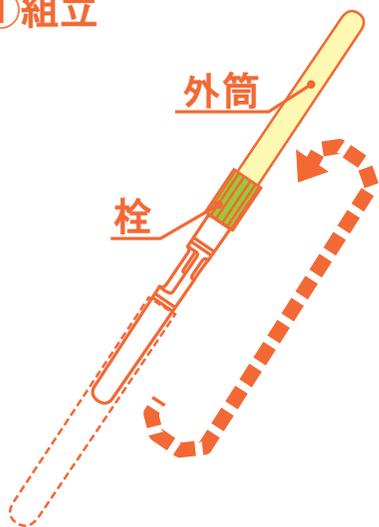


外筒を抜き取り、栓に  
しっかりさし込む。

### ②採尿




排尿しているところに、  
採尿口をあて容器一杯に  
入れる。

### ③密封

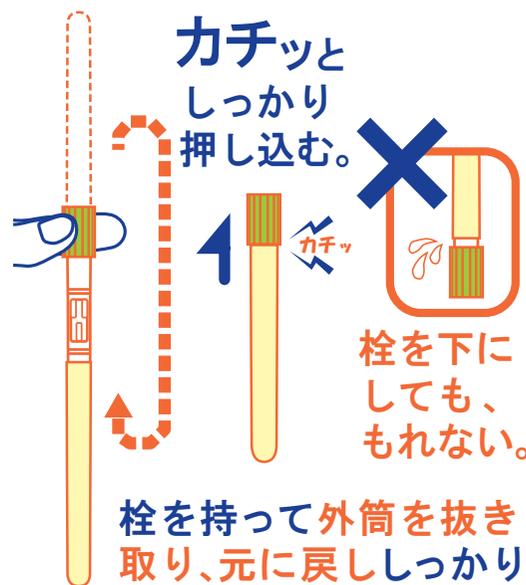

栓を持って外筒を抜き  
取り、元に戻ししっかり  
止まるまで押し込む。

### ④提出

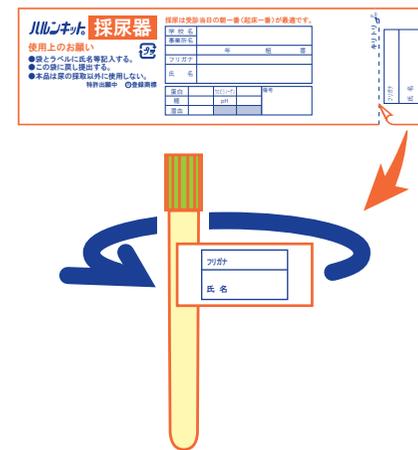

袋のラベルを切り取り、うらの  
テープをはがし、巻きつけ  
袋に入れ提出する。